

# QG1733

## Termômetro Digital Personalizado

Termômetro Personalizado com display digital.

Para que a temperatura do corpo seja medida de forma correta com o termômetro digital, deve-se seguir os passos:

1. Ligar o termômetro e verificar se na tela aparece o número zero
2. Colocar a ponta do termômetro debaixo da axila ou introduzir cuidadosamente no ânus, principalmente para medir a temperatura de crianças. No caso de medição no ânus, deve-se estar deitado de barriginha para cima, introduzir apenas a parte metálica do termômetro no ânus;
3. Esperar alguns segundos até ouvir um sinal sonoro;
4. Retirar o termômetro e verificar o valor da temperatura na tela;
5. Limpar a ponta metálica com algodão ou gaze umedecida em álcool.

Medidas aproximadas para gravação (CxL): 2,5 cm x 1 cm

Tamanho total aproximado (CxL): 14,4 cm x 2,2 cm

Peso aproximado (g): 24

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

---

**Caixa exterior (m):** xx

**Peso da caixa (Kg.):**

**Caixa Exterior (Un.):** 0

**Caixa interior (Un.):** 0

**NCMS:**



**Packing individual:**

**Repacking:**

---

QG Brindes Promocional Comércio de Brindes Ltda ME  
(11) 3891-2541 ■ vendas@qgbrindes.com.br